

ZenZipp Wundmanager

Der einzigartige ZenZipp Wundmanager bietet endlose Vorteile bei der traditionellen Versorgung von großen Wunden mit hohem Exsudat. In enger Zusammenarbeit mit Spezialisten, Pflege- und Wundexperten und Patienten haben wir den ZenZipp Wundmanager entwickelt.

Funktionalität und leichte Anwendbarkeit mit hohem Patientenkomfort stehen bei uns zentral und im Focus der Entwicklung von neuen Produkten.

Durch die unterschiedlich erhältlichen Größen und Formen gibt es einen ZenZipp Wundmanager für alle Wunden und jede Körpergröße.

Dabei hat der ZenZipp eine sehr flexible und hautfreundliche Klebefläche, ohne Gelatine, für optimalen Haft und Hautschutz. ZenSetiv Zubehör wie z.B. Alkoholfreie Hydrokolloid Paste und Hydrokolloid Streifen können eingesetzt werden um Hautunebenheiten aus zu gleichen. So wird die Wunde optimal abgedichtet, wodurch Leckagen und unangenehme Gerüche vermieden werden.

Dank der durchsichtigen, kräftigen Geruchsbarriere Folie kann die Wunde jederzeit beobachtet werden, ohne den Heilungsprozess zu beeinträchtigen.

Ein einzelner ZenZipp Wundmanager bietet mehrere Tage optimale Versorgung und gewährleistet somit nicht nur eine bessere Wundheilung, sondern auch einen besseren Schutz der umliegenden Haut.

Neben Sicherheit und Bequemlichkeit für Patienten und Fachkräfte erspart der ZenZipp Wundmanager durch seine lange Verwendbarkeit Zeit und Kosten.

Der ZenZipp hat einen einfach zu öffnen, wiederverschließbaren Zipper über die gesamte Länge des Wundmanagers. Das bietet einen sehr schnellen, bequemen Zugang zur Wunde, und ermöglicht eine schnelle und komfortable Wundversorgung.

Die verschiedenen Ablässe am ZenZipp Beutel bieten eine effektive Drainage. Es gibt Stopfen woran Katheter Beutel befestigt werden können, um den stetigen Abfluss zu gewährleisten. Gleichzeitig kann man den Ablass auch abschneiden und als Faltverschluss nutzen für dickflüssige Ausscheidungen.

Die Vorteile der ZenZipp Wundmanager

KOMFORTABLE WUNDVERSORGUNG

Größeren Komfort und längere Anwendbarkeit, für angenehmere Behandlung, Zeit- und Geldersparnisse

EINFACHER ZUGANG

Die über die gesamte Länge des Wundmanagers angebrachte Öffnung vereinfacht den Zugang zum Arbeitsbereich und bietet ideale Möglichkeiten zur Versorgung und Beobachtung.

OPTIMALE HAFT

Die weiche, hautfreundliche, hydrokolloide Klebefläche, ohne Gelatine, bietet eine optimale Haftung an der Haut durch ihre Flexibilität.

LUFTKISSEN

Durch das integrierte Ventil wird die Regulierung der Luftmenge im Wundmanager ermöglicht:

- Um zu vermeiden dass die Folie vom Beutel die Wundheilung stört, oder den Patienten Schmerzen zufügt, kann man über die Ventilklappe Luft in den Beutel lassen und somit ein Kissen bilden dass die Folie von der Wunde fern hält. Die Wunde bleibt unversehrt.
- Wenn sich zu viel Luft im Beutel sammelt, kann man den Beutel über die Ventilklappe entlüften.

KLETTVERSCHLUSS

Bei geöffnetem ZenZipp Wundmanager können die beide Teile des Zippers am Außen Rand des Beutels mittels Klettverschlüssen fixiert werden. Es entsteht eine große Arbeitsfläche entsteht die offen bleibt und die Wunde mit beiden Händen versorgen kann.




ABFLUSS UND KAPAZITÄT

Durch die besondere Beschaffenheit des Wundmanagers wird optimale Sammlungskapazität erreicht.

Der ZenZipp wurde speziell entwickelt für Wunden mit viel Exsudat, wie z.B. Wunden mit einer Fistel, Wunden in Kombination mit einem Stoma, oder stark infizierte Wunden.

DRAINAGE

Irrigation, Drainage und Anschließen von Auffangbeuteln werden durch unterschiedliche Auslässe möglich gemacht. Wird ein Ablaufventil nicht benötigt, kann es abgeschnitten und mit dem Faltverschluss sicher verschlossen werden. Egal ob Horizontale oder Vertikale Positionierung des Wundmanagers, ein Ablauf ist immer möglich, dank der 3 variablen Auslässe.

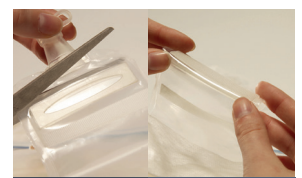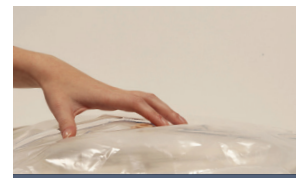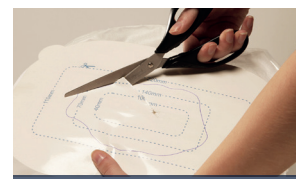

ZenZipp Wundmanager, für eine komfortable, zeitsparende und kostengünstige Behandlung

ZenZipp Wundmanager

Hautfreundliches Hydrokolloid; Grosse Öffnung mit Zipp-Verschluss; Optimale Drainage; bis zu 3 Auslässe

Maximum Schnitt Größen
170x120mm; 220x170mm; 270x190mm and 390x240mm



Maximum Schnitt Größen
110x110mm



Maximum Schnitt Größen
110x75mm



Maximum Schnitt Größen
50x30mm



ZENZIPP WUNDMANAGER

Artikel Nummer	Beschreibung	Grösse	Zipper	Ventil	Max. Schnitt	Stück pro VE	PZN
ZZ050030N	ZenZipp All-In-One Wound Manager Size XS No Zipper	Extra Small XS		X	Ø 50 x 30 mm	10	13568392
ZZ110075	ZenZipp All-In-One Wound Manager Size S With Zipper	Small S	X	X	Ø 110 x 75 mm	10	13568417
ZZ110075N	ZenZipp All-In-One Wound Manager Size S No Zipper	Small S		X	Ø 110 x 75 mm	10	13568400
ZZ110110	ZenZipp All-In-One Wound Manager Size SQ With Zipper	Small Square SQ	X	X	Ø 110 x 110 mm	5	13568357
ZZ110110N	ZenZipp All-In-One Wound Manager Size SQ No Zipper	Small Square SQ		X	Ø 110 x 110 mm	5	13568363
ZZ170120	ZenZipp All-In-One Wound Manager Size M With Zipper	Medium M	X	X	Ø 170 x 120 mm	3	13568386
ZZ170120N	ZenZipp All-In-One Wound Manager Size M No Zipper	Medium M		X	Ø 170 x 120 mm	3	13568340
ZZ220170	ZenZipp All-In-One Wound Manager Size M plus With Zipper	Medium Plus MP	X	X	Ø 220 x 170 mm	3	13568334
ZZ220170N	ZenZipp All-In-One Wound Manager Size M plus No Zipper	Medium Plus MP		X	Ø 220 x 170 mm	3	13568328
ZZ270190	ZenZipp All-In-One Wound Manager Size L With Zipper	Large L	X	X	Ø 270 x 190 mm	3	13568311
ZZ270190N	ZenZipp All-In-One Wound Manager Size L No Zipper	Large L		X	Ø 270 x 190 mm	3	13568305
ZZ390240	ZenZipp All-In-One Wound Manager Size XL With Zipper	Extra Large XL	X	X	Ø 390 x 240 mm	3	13568297